



Tvätt/rengöring

Väskor från SACCI får tvättas i tvättmaskin på 40°C.
De får **ej** centrifugeras utan ska dropptorka.
Får **ej** heller torktumlas.

Vid blod eller uppkastning på/i väskan, spola först av med vatten skura/torka av med Virkon eller liknande bakteriedödande medel.
Kör sedan väskan i tvättmaskin på 40°C.

Tag ur läkemedelsdelen och andra lösa väggar. Tvätta väska och läkemedelsdel separat. Väskan kan vara öppen vid tvätt.

OBS! Använd så stor tvättmaskin som möjligt, helst på tvätterier eller om möjligt större än 7 kilo. För väskor med plast-eller metallinsatser rekommenderas professionellt tvätterier.